

Ohje ammattilaisille

Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Turun yliopistollinen keskussairaala

Klamydia- ja tippurinäytteenotto kohdunkaulakanavasta (cervix) (1738 CtGcNhO)

Tutkimusta käytetään klamydian ja tippurin aiheuttajabakteerien osoittamiseen kohdunkaulakanavasta.

Tarvittavat välineet:

1. Näytteenottopakkaus (Kuva 1), joka sisältää kuljetusputken, näytteenottotikun sekä pipetin (ALINITY M MULTI-COLLECT SPECIMEN COLLECTION KIT, Tuotekoodi: 09N19-00, Abakus tilausnumero: 957094, pienin toimitettava pakkauskoko: 10 x 50 kpl).
2. Muovipussi ja pyyntötarra.



Kuva 1

Näytteenotto:

HUOM. Näytteenottotikulla EI SAA koskea kuljetusputken nesteeseen ennen cervix-näytteen ottamista.

1. Avaa näytteenottopakkaus. Näytteenottoon tarvitset paketissa olevan kuljetusputken ja näytteenottotikun. Pakkauksen sisältämää kertakäyttöpipettiä et tarvitse. Sen voi hävittää.
2. Ota näytetikka varovasti paketista, välttäen koskettamasta sen kärkeä. Aseta näytetikun valkoinen, pehmeä kärki kohdunkaulakanavaan ja pyöritä tikkua n. 15 - 30 sekuntia riittävän näytemäärän varmistamiseksi.
3. Poista näytteenottotikka varovasti.

4. Avaa näyteputken korkki. Käsittele avointa putkea aseptisesti, välttämällä koskettamasta putken kärkeä ja korkin sisäpintoja.

HUOM! Näyteputken neste ärsyttää voimakkaasti silmiä. Jos nestettä roiskuu silmiin, huuhtelee huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Piilolasit on otettava pois, mikäli se onnistuu helposti. Jatka silmien huuhtelua. Käännyttävä lääkärin puoleen, jos silmien ärsytys jatkuu. Jos putki kaatuu tai neste valuu putkesta pois, on pyydettävä uusi näytteenottoasetti.

5. Laita näytetikku näyteputkeen (valkoinen, pehmeä kärki tulee putken alaosaan kohti).
6. Katkaise näytetikku varovasti merkitystä katkaisukohdasta, varoen roiskuttamasta putken sisältöä.
7. Sulje putken korkki huolellisesti.
8. Kiinnitä putkeen pyyntötarra.
9. Laita kuljetusputki muovipussiin.
10. Säilytä kuljetusputki huoneenlämmössä.